

Краткая рекомендация по эксплуатации оборудования:
Концентратор кислорода Longfian JAY-10

- 1) Перед первым включением, **дождитесь, пока аппарат примет комнатную температуру** (во избежание появления конденсата на внутренних платах прибора).
- 2) **Соберите концентратор полностью** – подключите стакан увлажнителя, установите фильтр (при необходимости).
- 3) Прибор выделяет кислород из воздуха с помощью цеолитовых колонок. **При включении, в течении 5 минут аппарат набирает необходимый уровень кислорода.** По прошествии 5 минут вы можете начинать терапию - после пары вдохов кислород поступит к датчику концентрации и концентратор сообщит о готовности к работе.
- 4) Вы можете использовать канюли и кислородные маски длиной до 15 метров. Проверяйте, чтобы шланг не был пережат или перекручен.
- 5) Если в сети питания 220 В наблюдались перепады напряжения, либо вы находитесь за городом – рекомендуем подключать концентратор через сетевой фильтр, что позволит сохранить блок питания и платы в случае перепада напряжения.
- 6) Запрещается транспортировка концентратора с подключенным стаканом для увлажнения воздуха, заполненным водой.
- 7) Концентратор не имеет встроенной аккумуляторной батареи – разрешен к авиа-перевозке.